

*Spezialtische für
die Patientenlagerung*



Unser Anspruch:

Kostenersparnis durch verbesserten Ablauf
Ausgewogenes Preis- / Leistungsverhältnis
Durchdachte Funktionalität

Hospitalline

Vorbereiten - Operieren - Nachruhen



Der Patient kann sich mühelos auf den nur stuhlhohen OP-Tisch (55cm in Tiefstposition) setzen und legen.

Die Akkusteuerung erlaubt bereits während des Transportes den Patienten in die gewünschte Höhe zu fahren.

Der Operateur kann jederzeit selbst die Tischhöhe über den Fußtaster nachjustieren ohne auf die Hilfe des OP-Personals angewiesen zu sein. Auf diese Weise kann stets in der Schärfenebene des OP-Microskops verblieben werden.

Sowohl das Rückenteil, als auch die Kopfstütze des OP-Tisches können mit einer Hand über die Gasfederverstellung (an der Kopfstützenunterseite), schnell und direkt in eine für den Patienten bequeme und op-gerechte Position gebracht werden.

Die Verstelltaster bleiben für den Operateur auch intraoperativ unter sterilen Bedingungen des Abdecktuches erreichbar.

Die OPTIMO



Durch die große Beinfreiheit welche die OPTIMO im Kopf- bis Rückenbereich bietet können selbst größere Fußsteuerungen von OP-Mikroskop und Phako/Vitrektomiegerät u.a. bequem und gut erreichbar unter dem OP-Tisch platziert werden. Der OP-Tisch ist mit voll drehbaren Doppelaufrollen ausgestattet, welche sich beidseitig über Pedale zentral feststellen lassen. Diese Vier-Punkt-Fixierung gibt maximale Standsicherheit während der Operation. Für längere Transportwege ist für ein Rad eine Richtungsfeststellung zuschaltbar.

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück zzgl. MwSt	€/Stück incl. MwSt
OP-Tisch OPTIMO	Op7510000	4.698,00	5.590,62
Zubehör:			
Schocklage elektromotorisch	OP7510100	546,50	650,34
Schiebegriffe abklappbar	OP7510200	89,00	105,91
Normschiene L = 25 cm	OP7510500	73,20	87,11
Normschiene L = 110 cm	OP7510550	166,30	197,90
Infusionsständer mit Spannkloben	OP7510400	273,00	324,87
Spannkloben drehbar D=16-18mm	OP7510430	245,00	291,55
Spannkloben D= 16-18mm	OP7510440	165,00	196,35
Halteklau mit Gewinde M10	OP7510410	120,00	142,80
Narkosetuchhalter, ohne Halteklau	OP7510450	108,00	128,52
Handfessel für Normschiene	OP7510420	160,00	190,40
Kopfring elektrisch leitfähig	OP7510600	85,00	101,15
Kopfring aufblasbar	OP7510610	7,00	8,33
Polsterteile elektrisch leitfähig	B0630070090	127,00	151,13




Schiebegriffe

Grundausstattung "OPTIMO"

Die Optimo wurde in enger Kooperation mit dem Initiator Dr. med. Ulrich Jung entwickelt und zeichnet sich durch hohen praktischen Nutzen, Stabilität und Sicherheit aus.

Elektromotorische Höhenverstellung von ca. 55 - 110 cm über Hand und Fußsteuerung. 1-tlg. Liegefläche Komfortable Polsterung 2 cm Verbundschaum kaschiert mit 2 cm Schaumstoff
Einhand Kopfteilverstellung von ca. - 40° bis + 25° stufenlos über Gasdruckfeder. Einhand Rückenteilverstellung von ca. - 10° bis + 20° stufenlos über Gasdruckfeder
Polsterfläche: L: 195 cm B: 66 cm
Voll-drehbare gekapselte Doppelaufrollen (125mm) über Pedal beidseitig der Liege komplett feststellbar, zuschaltbare Lenkhilfe oder komplett frei. Akkubetriebener Elektromotor (24 V DC)
Hubkraft ca. 180 kg, Schutzart IP 21 mit Akkuladeautomatik und Netzkabel (230 V)

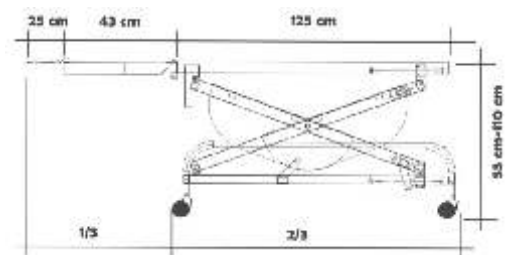

Optimale Arbeitsbereichaufteilung

Hospitalline

Entwickelt für die Lagerung und den Transport von Patient innerhalb der Klinik- bzw. Praxisräume, beweist die HYDRA-Mobil in der Praxis ihr Können durch spielerisches Handling zu einem ausgewogenen PreisLeistungsverhältnis.

Der Kernpunkt des spielerischen Handlings liegt neben den Abmessungen wie auch dem Gewicht der Liege auch schwerpunktmäßig bei den verwendeten 125mm Doppelaufrollen mit Zentral- und Richtungsfeststellung. Die Laufrollen sind Praxiserprobt, da sie seit längerem Anwendung in dem Bereich Pflegebetten finden.



HYDRA-MOBIL
(mit optionalem Zubehör)

Abgebildetes Zubehör:

- Schiebegriffe
- Wäschekorb
- Seitengitter
- Schocklage

Die Laufrollen ermöglichen dem Personal drei Funktionen, welche über die seitlichen Tritthebel am Ende der Liege geschaltet werden.


- **Alle Rollen frei gestellt:** Auf diese Weise kann die Liege in engen Räumen ohne Probleme bewegt und gewendet werden.
- **Eine Rolle in Fahrrichtung arretiert:** Hierdurch werden lange gerade Wegstrecken für eine Person zum Kinderspiel, die Liege bricht nicht aus sondern bleibt spurtreu.
- **Alle Rollen fest gestellt:** Hier bewegt sich nichts mehr durch die Lenk- und Rollen Feststellung ist absolute Standsicherheit gewährleistet.

Über das am Fußende angebrachte Fußpedal kann die Liege schnell und von Strom unabhängig in der Höhe von 60 - 95 cm verstellt werden. Die freie Konstruktion des Hubsystems bietet viel Platz unter der Liege, wodurch die Montage eines optionalen Wäschekorbes ermöglicht wird. Durch optionale Schocklagenanstellung kann die Liege auch zur Lagerung und Transport von kreislaufschwachen Patienten eingesetzt werden.

Als Komfortsteigerung für den Patienten kann das Kopfteil stufenlos positiv angestellt werden.

HYDRA-MOBIL


Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	€/Stück	€/Stück
		zzgl. MwSt	incl. MwSt
HYDRA-MOBIL -Eco-	MKHM0100	1.860,00	2.213,40
HYDRA-MOBIL	MKHM0110	2.310,00	2.748,90
Zubehör:			
Kopfteilpolster mit Nasenschlitz	B06107000	22,00	26,184
Polsterabdeckung für Nasenschlitz	B06107100	21,00	24,99
Schocklage über Gasfeder	MKHM0140	224,00	266,56
Normschiene L = 60 cm	MKHM0120	105,00	124,95
Seitengitter absenkbar 2x	MKHM0130	554,00	659,26
Wäschekorb unter der Liege	MKHM0160	115,00	136,85
Halter für Infusionsständer 2x	MKHM0150	30,00	35,70
Infusionsständer	MKHM0200	78,00	92,82
Kopfteilpolster elektrisch leitfähig	B0630050090	39,00	46,41
Liegenpolster elektrisch leitfähig	B0630100090	88,00	104,72

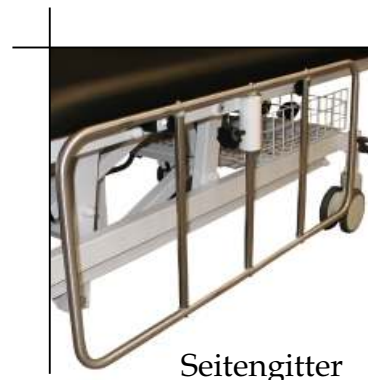

Seitengitter



Schiebegriffe

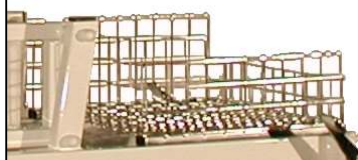

Wäschekorb



Schocklage

HYDRA-MOBIL-Eco

Die "HYDRA-MOBIL-Eco" für den eher ortsgebundenen Einsatz!

Wie die HYDRA-MOBIL, lässt sich auch das Modell "Eco" mit dem identischen Zubehör ausstatten, lediglich bei den Fahrrollen wird ein anderes System verwendet.



Die Fahrrollen der HYDRA-MOBIL-Eco sind Einzelrollen mit einem Durchmesser von 125mm, welche sich einzeln in Lauf und Drehrichtung feststellen lassen.

Bei Fragen und Anregungen
immer für Sie da:

M&K Therapiegeräte GmbH & Co. KG.
Fischbach 15

35418 Buseck

Tel.: 06408 / 50 30 998

Fax: 06408 / 50 30 995

E-mail: therapie-geraete@t-online.de

www.therapie-geraete.de

